


Attends® For Men

Level 1 & 2




Brukerveiledning

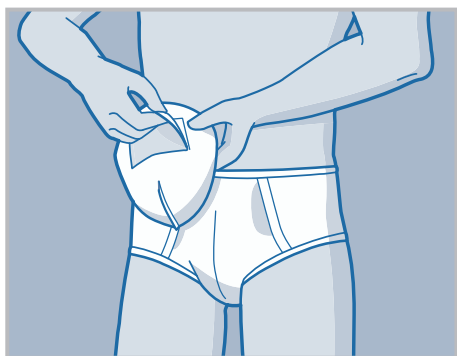

1 Pass på at produktet er brettet helt ut med den bredeste delen vendt oppover (som pilene på beskyttelsespapiret indikerer). Ta bort papiret som beskytter tapen.



2 Sett produktet på plass i undertøyet, og pass på at beskyttelsen beholder sin skålfrem når det fikseses.

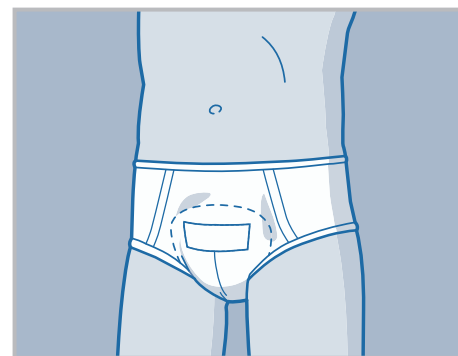

3 Fest produktet i undertøyet ved hjelp av festetapen. Pass på at festetapen ikke havner mot huden.

Tips og råd

Utvalg

- Velg absorpsjonsnivå på beskyttelsen ut fra en individuell bedømming av brukerens behov.
- For å oppnå en best mulig fiksering anbefaler vi at beskyttelsen brukes i kombinasjon med tettsittende undertøy.
- Vi anbefaler ikke bruk av boxershorts.

Avfallshåndtering

- Rull sammen produktet og kast det i henhold til gjeldende avfallsregler.
- Ikke kast produktet i toalettet.

For mer informasjon, besøk www.attends.no

Attends® For Men

Level 3 & 4




Brukerveiledning



- 1 Pass på at produktet er brettet helt ut med den bredeste delen vendt oppover (som pilene på beskyttelsespapiret indikerer). Ta bort papiret som beskytter tapen.



- 2 Skålfør produktet forsiktig i lengderetningen for å sikre at lekkasjesperrene vender opp. Ikke rør lekkasjesperrene - de vil forme og tilpasse seg naturlig med produktet. Sett produktet på plass i undertøyet, og pass på at det holder sin skålfør når det fikseres.

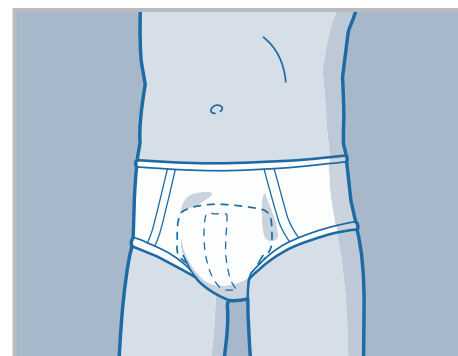

- 3 Fest produktet i undertøyet ved hjelp av festetapen. Pass på at festetapen ikke havner mot huden.

Tips og råd

Utvalg

- Velg absorpsjonsnivå på beskyttelsen ut fra en individuell bedømming av brukerens behov.
- For å oppnå en best mulig fiksering anbefaler vi at beskyttelsen brukes i kombinasjon med tettsittende undertøy.
- Vi anbefaler ikke bruk av boxershorts.

Avfallshåndtering

- Rull sammen produktet og kast det i henhold til gjeldende avfallsregler.
- Ikke kast produktet i toalettet.

For mer informasjon, besøk www.attends.no