


Attends® Slip Regular



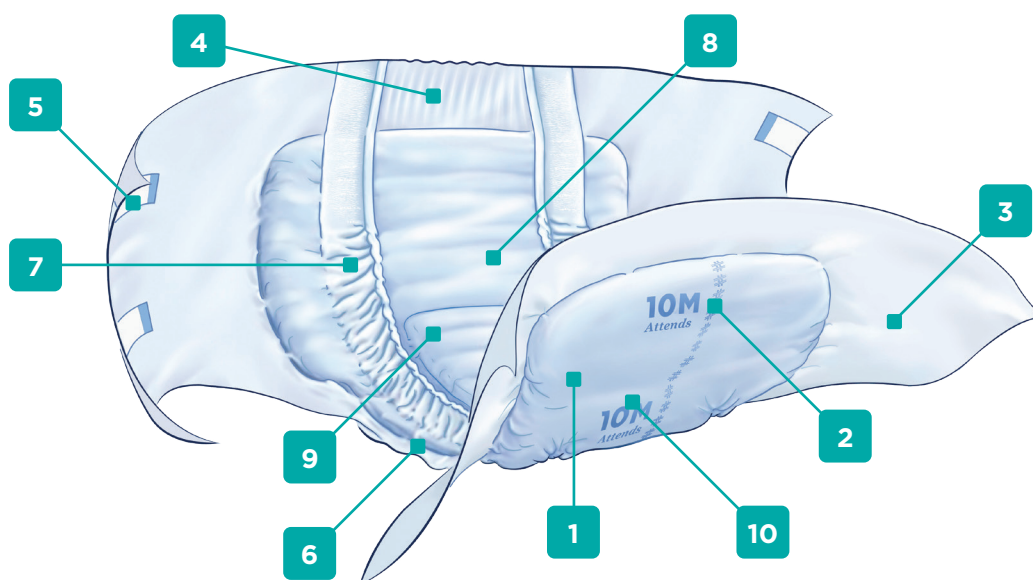








Attends - et inkontinenssystem i 10 ulike absorpsjonsgrader

Attends Slip Regular er en serie diskrete alt-i-ett tapebleier som er utviklet for tung inkontinens.



- | | | |
|---|---|---|
| 1 Hvit pustende tekstillignende bakside som holder væsken inne. | 2 Våtindikatoren gir en indikasjon på når bleien bør skiftes. | 3 Pustende tekstillignende festebeltet gir økt komfort og støtte rundt midjen samt god hudomsorg. |
| 4 Elastisk livviddebånd som gir ekstra god passform (utenom Slip XS). | 5 Et justerbart fikseringssystem med fire taper sikrer at produktet holdes på plass. | 6 Formet benelastikk for optimal passform og redusert risiko for lekkasje. |
| 7 Lekkasjesperrer reduserer risikoen for lekkasje. | 8 Anatomisk utformet kjerne gir en tettstittende og komfortabel passform. | 9 Superabsorberende kjerne med Odour Protection gir økt lekkasjesikkerhet, tørrhet i overflaten og reduserer risikoen for ubehagelig lukt. |
| 10 Informasjon om produktets størrelse og absorpsjonsnivå er trykket på baksiden av bleien for enkel håndtering. | | |

For mer informasjon, besøk www.attends.no

	Antall pr. pose Antall poser pr. kartong	Varenummer Artikkelnummer	Hofte- og livviddemål (cm)	Bakside	Materiale i absorpsjonskjernen	Overflatemateriale	Elastisk livviddebånd	Lekkasjesperrer	Fiksering for flergangsbruk			
Attends Slip Regular 9XS 	32 4	898071 208199	40 - 70	Laminat av nonwoven og pustende film	Doble absorpsjonslag med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	X	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9S 	21 4	968530 208113	50 - 85	Laminat av nonwoven og pustende film	Doble absorpsjonslag med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9M 	28 4	978732 203323	80 - 110	Laminat av nonwoven og pustende film	Doble absorpsjonslag med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9L 	28 4	927540 203347	100 - 150	Laminat av nonwoven og pustende film	Doble absorpsjonslag med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10M 	26 4	924787 207697	80 - 110	Laminat av nonwoven og pustende film	Doble absorpsjonslag med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10L 	26 2	878395 207666	100 - 150	Laminat av nonwoven og pustende film	Doble absorpsjonslag med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Quick-Dry

Quick-Dry er distribusjonslaget som er plassert rett under overflaten hvor væsken trekkes inn i produktet. Dette laget absorberer væsken raskt bort fra huden og inn i produktet, og hindrer at væsken returnerer til overflaten. Distribusjonslaget kan håndtere flere urinavganger uten å miste effektiviteten i særlig grad. Dette fører til optimal tørrhet mot brukerens hud samt lekkasjesikkerhet.



pH-verdi

Kjerneteknologien med de spiralformede fibrene i distribusjonslaget garanterer en lav pH-verdi som ligner hudens. Dette beskytter huden og bidrar til god hudomsorg.



Naturlig Odour Protection

Naturlig Odour Protection reduserer risikoen for ubehagelig lukt.



Active Zone

Active Zone er et område midt i produktet, med høy absorpsjonsevne der det virkelig trengs. Høy absorpsjon her gir optimal tørrhet og lekkasjesikkerhet for brukeren.



Pustende

Det pustende materiale tillater huden å puste, noe som bidrar til god hudomsorg.



Attends Slip er testet og godkjent av proDERM, institutt for dermatologisk forskning. (Utenom Slip Regular 9XS)