


Når du plasserer Butterfly er den mest effektiv og komfortabel hvis den er plassert hele veien opp mellom rumpeballene, og midten av innlegget plasseres mot analåpningen. Det kan kreve litt øvelse å plassere Butterfly riktig slik at den passer best for deg.

Slik bruker du Butterfly

Følg instruksjonene under for optimal komfort og beskyttelse.

Steg 1 Fold innlegget med festetapen ut.

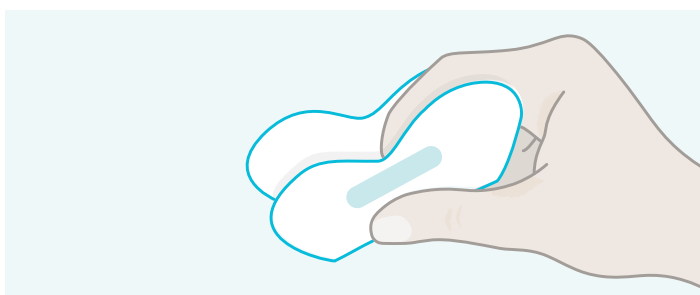

Fjern papiret på baksiden og fold Butterflyinnlegget på midten med festetapen på utsiden.

Hold innlegget slik at de lange vingene peker oppover mot ryggen. Dette vil også gjøre det enklere å fjerne innlegget ved behov.

Steg 2 Plassering av Butterfly.



For å plassere Butterfly på enklest mulig måte, kan du bøye deg enten:

- 1.** Fremover og strekk deg rundt kroppen for å plassere produktet mellom rumpeballene.
- Eller 2.** Når du sitter på toalettet, strekk hånden mellom bena og plasser produktet mellom rumpeballene.
- Eller 3.** Sett ene benet på toalettsetet, strekk hånden mellom bena og plasser produktet mellom rumpeballene.

Plasser Butterfly enten bakfra eller forfra slik at midten av innlegget ender mot analåpningen. Trykk festetapen lett mot huden ved hjelp av fingeren slik at den sitter på plass.

Tips og råd

- Midten av produktet skal forsiktig berøre analåpningen. Når du begynner å bruke Butterfly kan du oppleve at det føles merkelig å ha noe mellom rumpeballene, men om produktet er plassert riktig skal det føles komfortabelt. Dersom det ikke er komfortabelt, sjekk at midten av innlegget er plassert nær analåpningen og at festetapene sitter forsiktig mot huden.
- Festetapene skal forsiktig festes til huden slik at Butterfly produktet ikke flytter på seg og blir ubehagelig å bruke. Butterfly føles mest komfortabel når den er forsiktig festet mot huden slik at den sitter godt på plass.
- Når Butterfly er riktig plassert skal de "lange vingene" vende oppover mot ryggen og de "korte vingene" nedover. Dette gjør det også enklere når du skal fjerne produktet.
- Kvinner: Når innlegget sitter på plass skal det sitte så høyt opp mellom rumpeballene at produktets vinger ikke treffes av urin når du tisser. Dersom innlegget blir vått når du tisser, forsøk å plassere det litt høyere opp mellom rumpeballene. Du kan også vurdere å prøve størrelse S/M dersom du bruker størrelse L/XL, eller fjerne innlegget når du tisser og sette det på plass igjen etterpå.
- Når Butterfly er ferdig brukt, fjern innlegget forsiktig fra huden ved å holde i de lange vingene med hånden. Rør ikke midten av innlegget.
- Kast Butterflyproduktet på samme måte som andre sanitetsprodukter, for eksempel i en søppelbøtte innpakket i toalettpapir eller i en forseglet plastpose.

Les mer om Butterfly på www.attends.no